

## KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

### Infos zu Hörsystemen

Sollte der Betroffene noch nicht ganz vertraut im Umgang mit dem eigenen Hörsystem sein, könnten einige Tipps sehr hilfreich sein. Das induktive Hören beim Telefonieren wird häufig (automatisch) praktiziert, leider aber noch viel zu selten das induktive, und damit störschallfreie Hören in Räumen mit fest verlegten Induktionsanlagen. Solche Räumlichkeiten bzw. Bereiche sind normgerecht mit dem blauen Induktions-Piktogramm gekennzeichnet, das dem Hörgeräteträger signalisiert, auf induktives Hören umzuschalten, weil ein störschallfreies Sprachsignal angeboten wird. Die sonst meist störende Raumakustik sowie gegebenenfalls unerwünschten Reflexionen werden dabei weitgehend unterdrückt.

Wenn der Betroffene induktiv hören will, muss das Hörsystem **IMMER** auf „induktives Hören“ umgeschaltet werden. Ob diese Funktion überhaupt eingebaut ist und wie dies durchgeführt wird, kann nur sein Hörgeräteakustiker (HGA) erklären. In den HdO-Geräten (hinter dem Ohr) ist diese Funktion sehr häufig (~85%) zu finden. In den IdO-Geräten (in dem Ohr) gehört dies seltener zur Standardausstattung, ist aber manchmal nachrüstbar.

Moderne digitale Hörsysteme haben meist einen kleinen Druckknopf mit dem die vom HGA individuell für den Hörgeräteträger gespeicherten Hörprogramme (meist bis zu 4 oder sogar 8) nacheinander abgerufen werden können. Welche Hörsituation an welchem Programmplatz gespeichert wurde, weiß nur der HGA, denn dieser hat die Priorität bzw. Reihenfolge der Hörprogramme gemeinsam mit dem Betroffenen festgelegt!

Herkömmliche Hörsysteme und Fernbedienungen gibt es auch mit einem klassischen Umschalter M/MT/T oder nur M/T. Stellung „M“ ist der normale Mikrofonbetrieb. „T“ (Telefonspule) ist der normale und ausschließliche Betrieb beim Telefonieren und Induktivhören. „MT“ kann auch zum Induktivhören verwendet werden, jedoch ist der Hörsystemträger dabei auch über das deutlich schwächer reagierende Mikrofon noch ansprechbar.

für weitere Informationen zum Thema  
„induktiv hören“ oder ‚barrierefrei hören‘  
besuchen Sie den **Downloadbereich** auf:

